



## Zestaw do wrastających paznokci z tamponadą Ligasano® - profilaktyka i zapobieganie

**Producent:** Ligasano®

Czas wysyłki: Dostawa 1-2 dni

**Cena**

98,00 PLN

**Produkt dostępny w następujących wariantach:**

**Rodzaj preparatu:** Pedibaehr® • Płyn zmiękczający ,  
PODOFLEX® Fluid 10 ml Gehwol • Płyn zmiękczający

## Opis produktu

### Zestaw do wrastających paznokci z tamponadą Ligasano® - profilaktyka i zapobieganie

- **Pedibaehr® • Płyn zmiękczający paznokcie**

Pedibaehr płyn **do zmiękczenia paznokci** to preparat niezastąpiony podczas **leczenia twardych i grubych paznokci**. Płyn sprawia, że twarde i zgrubiałe paznokcie mięknią, co znacznie ułatwia dalsze etapy zabiegu.

Preparat ułatwia również usuwanie silnie zrogowaciałego naskórka. Zawarta w nim alantonina pozwala uniknąć podrażnień. Twarde i grube paznokcie stają się miękkie i sprężyste.

Płyn do zmiękczenia paznokci sprzedawany jest razem z pipetą.

#### **Sposób użycia**

Na płytkę paznokciową i skórki nałożyć za pomocą pipety kilka kropel płyn. Pozostawić na kilka minut, następnie rozpocząć zabieg obcinania paznokci.

#### **INCI**

Aqua (Water), Glycerin, Sodium Hydroxide, Sorbitol, Allantoin.

**Poj. 30 ml**

- **Podo - Płyn zmiękczaący paznokcie i skórki, zapobieganie wrastaniu paznokci**

Preparat zapobiega wrastaniu paznokci. Łagodzi ból spowodowany **naciskiem i wrastaniem paznokcia w skórę**. Płyn zawiera wodorotlenek potasu i olej rycynowy - substancje te mają działanie zmiękczące na paznokcie i na skórki. Dzięki systematycznemu stosowaniu płynu wysuszone i skłonne do rogowacenia skórki stają się elastyczne już po kilku aplikacjach (ok. 1 tydzień) i łatwo dają się odsuwać.

Preparat wykazuje, również działanie przeciw bakteryjne, przeciw zapalne i przeciw grzybicze po jego zastosowaniu łatwo jest skrócić paznokcie oraz opracować wały boczne w celu usunięcia zanieczyszczeń i zrogowaceń. **Bardzo dobrze zmiękcza paznokcie.**

**Sposób stosowania :**

Aplikować 1-2 razy dziennie na miejsca ucisku i brzegi paznokcia do czasu zniknięcia dolegliwości. Nie dłużej niż 2 tygodnie – po tym okresie należy preparat odstawić i ponownie używać go po 2 tygodniach przerwy.

**Skład:** wodorotlenek potasu, olej rycynowy, pantenol, bisabolol, clotrimazol.

**Poj. 10 ml**

- **PODOFLEX® Fluid na wrastające paznokcie**

**Wskazania**

Do pielęgnacji stóp z problemem wrastających paznokci, zrogowaceń w wałach paznokciowych. Polecany dla diabetyków. Zalety: Połączenie naturalnych olejków z drzewa herbacianego, goździkowego, lawendowego oraz mięty pieprzowej sprawiają, że preparat ma działanie zmiękczące, dezynfekujące, odświeżające. Wspomaga profilaktykę przeciwgrzybiczą paznokci, łagodzi podrażnienia i stany zapalne naskórka. Zawarty w preparacie naturalny olej sojowy bogaty w lecytynę i witaminę E doskonale odżywia skórę i wspomaga lipidową barierę ochronną. Kosmetyki i preparaty PODOPHARM można stosować również u dzieci od 6 roku życia.

**Sposób użycia**

1-2 kropli zaaplikować na wybrane miejsce. Stosować regularnie 2 razy dziennie.

Świetnie się sprawdza do zmiękczenia paznokci przed obcinaniem i oczyszczaniem.

**Poj.10 ml**

- **Tamponada Ligasano®**

Opatrunki Ligasano® mają fantastyczne właściwości opatrunkowe. Są przeznaczone do stosowania **na trudno gojące się rany**. Opatrunki Ligasano® są idealne jako odciążenia na pękające pięty czy haluksy. Bardzo dobrze sprawdzają się do wykonywania tamponady przy wrastających paznokciach.

Doskonale wchłania wilgoć z ran nie przywierając do nich, jak inne opatrunki, dotlenia tkankę, oczyszcza i przyspiesza ziarninowanie.

**Właściwości Ligasano®:**

- Doskonały przy wykonywaniu tamponady przy wrastających paznokciach.
- Działa przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie.
- Bardzo dobrze wchłania wilgoć z ran.
- Nie przywiera do rany tak jak inne opatrunki
- W optymalny sposób dotlenia tkankę, oczyszcza i przyspiesza ziarninowanie.
- Działa odciążająco i zapewnia dobrą amortyzację.

Zmian opatrunku **należy dokonywać 1 raz na 2 dni**, jednak nie później niż po pojawieniu się na zewnętrznej stronie opatrunku Ligasano widocznego śladu przesiąkania wydzieliny z rany. W przypadku ran mocno sączących się, w okresie oczyszczania, opatrunek powinien być zmieniany **nawet kilka razy dziennie**. W przypadku profilaktyki i braku stanu zapalnego tamponadę **możemy wymieniać raz w tygodniu**.

**Ligasano® jest wrażliwe na pomienie UV oraz wilgoć należy je przechowywać w ciemnym i suchym miejscu.**

Tamponada ma 50 cm długości, 5 cm szerokości i 0,3 cm grubości

**Do każdej tamponady jest dołączona instrukcja aplikacji.**

- **Sonda precyzyjna podologiczna**

Narzędzie służy do łatwego oczyszczania wałów okołopaznokciowych **ze zgromadzonych zanieczyszczeń i zrogowaceń**, które mogą być również przyczyną wrastania paznokcia. Dobrze oczyszczony paznokieć po obcięciu zapobiega **nieprzyjemnym efektom wrastania**.

Sonda jest narzędziem wielokrotnego użytku wykonana z **wysokiej klasy stali chirurgicznej** w gabinetach można ją **dezynfekować i sterylizować**, a warunkach domowych myć i dezynfekować po każdym użyciu.